

Ленинградское областное государственное  
автономное учреждение  
«Кингисеппский центр социального обслуживания  
граждан пожилого возраста и инвалидов»  
(ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»)

П Р И К А З

от 11 октября 2022 г.

№ 122

**Об осуществлении санитарной обработки  
предметов проката**

На основании пункта 3.5 Положения об организации работы пункта проката технических средств реабилитации в Ленинградском областном государственном автономном учреждении «Кингисеппский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», утвержденного приказом по учреждению от 11 октября 2022 №121,

**приказываю:**

1. Утвердить инструкцию по осуществлению обработки предметов проката после возврата технических средств реабилитации в ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО» (Приложение № 1).
2. Специалисту по социальной работе реабилитационного отделения социального обслуживания Переведенцевой Е.В., производить обработку предметов проката в соответствии с инструкцией.
3. Признать утратившим силу приказ от 30 декабря 2019 года №132 «Об осуществлении обработки предметов проката».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора  
ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»



Ю.Н.Ковалевская

С приказом ознакомлена:



Переведенцева Е.В.

## Инструкция по осуществлению обработки предметов проката

### 1. Общие вопросы.

1.1. Растворы средства «ЖАВЕЛЬ СОЛИД» предназначены для дезинфекции поверхностей в помещениях, предметов обстановки; предметов ухода за больными; изделий медицинского назначения; санитарно-технического оборудования; уборочного инвентаря и других предметов проката.

1.2. Рабочие растворы готовят в эмалированных, стеклянных или пластмассовых емкостях путем растворения таблеток средства «Жавель Солид» в воде.

### 2. Приготовление рабочих растворов.

2.1. Рабочий раствор для дезинфекции предметов проката готовится с учетом необходимого содержания в нем активного хлора в соответствии с табл.1.

Табл.1

Содержание в растворе активного хлора, %	Количество таблеток на 10л воды
0,06	4
0,1	7

### 3. Режимы дезинфекции.

3.1. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ЖАВЕЛЬ СОЛИД» отражены в таб.2.

Табл.2

Объекты обеззараживания	Вирусные инфекции		Бактериальные инфекции		Способ обеззараживания
	Концентрация по активному хлору, %	Время обеззараживания, мин.	Концентрация по активному хлору, %	Время обеззараживания, мин.	
Изделия медицинского	0,1	60	0,1	60	Погружение

назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, пластмасс, резин					
Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин	0,1	60	0,1	60	Погружение или протирание
Санитарно-техническое оборудование *	0,06	60	0,06	60	Двукратное протирание
Уборочный инвентарь	0,1	120	0,2	60	Замачивание

\* Обеззараживание может проводиться с добавлением 0,5% моющего средства.

#### 4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

4.1. При приготовлении рабочих растворов средства «ЖАВЕЛЬ СОЛИД» не требуется применение средств индивидуальной защиты.

4.2. Работу с растворами в концентрации выше 0,1% активного хлора, а также работы способом орошения следует проводить с защитой органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В и с защитой глаз герметичными очками.

4.3. Все виды работ с растворами в концентрации до 0,1% активного хлора способом протирания или погружения можно проводить без средств защиты органов дыхания, избегать попадания в глаза.

4.4. Все виды работ со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.